



ENKEL FORBEHANDLING AV INSTRUMENTER

Aniosyme Foam

KLAR TIL BRUK SKUM TIL FORBEHANDLING AV MEDISINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER

Skumspray for rengjøring av medisinske og kirurgiske instrumenter. Sikrer optimal oppløsning av contamination på instrumenter med lang virketid (opptil 72 timer) eller før maskinbehandling.

Aniosyme Foam er:

- **ENKEL** - Enkel å bruke
- **RASK** - Forhindrer uttørking av contamination
- **EFFEKTIV** - Stabilt skum med god fukting



Aniosyme Foam

Klar til bruk skum til forbehandling av medisinske og kirurgiske instrumenter



Aniosyme Foam
Spray

ENKEL

Enkel å bruke.

RASK

Hindrer uttørking av contamination.

EFFEKTIV


Stabilt skum med god fukting.

VÅRT TILBUD	DINE FORDELER	ANIOSYME FOAM
ENKEL - Enkel å bruke	Klar til bruk i en praktisk flaske	Ja
RASK - Forhindrer uttørking av contamination	Gjør videre forberedelser lettere	Ja
EFFEKTIV - Stabilt skum med god fukting	Forberedelser kan starte under operasjonen	Ja

BRUKSOMRÅDER

Klar til bruk skum til forbehandling for optimal oppløsning av contamination på instrumenter med lang virketid (opptil 72 timer), eller før maskinbehandling. Forhindrer uttørking av contamination, og gjør rengjøringen lettere med en god effekt. Det tykke skummet garanterer et jevn dekke på instrumentets overflate. Aniosyme Foam er kompatibel med et bredt utvalg av materialer. Ikke egnet for instrumenter laget av sink eller jern.

BRUKERVEILEDNING FOR ANIOSYME FOAM

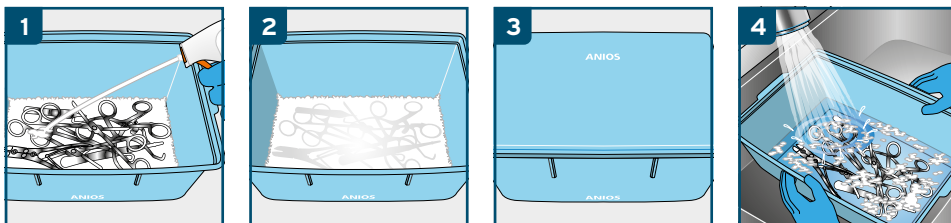

- Spray først aniosyme-skum på bunnen av bløtleggingskaret, og plasser deretter instrumenter som er samlet inn.
- Dekk alle instrumentene med skum.
- Dekk karet med lokk.
- Skyll behandlet medisinsk utstyr grundig med rent vann for å fjerne alle spor av produktrester og organisk tilsussing.

BESTILLINGSINFORMASJON

PRODUKT	PAKNINGSENHET	VARENUMMER
Aniosyme Foam	12 x 750 ml flaske	3105360



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuert av:
PULS AS
Brynsveien 14
0667 OSLO
Tlf: +47 22 30 05 00
www.puls.no

BRUKSOMRÅDE

Rengjøring av medisinsk-kirurgisk utstyr: for tørr transport eller før maskinrengjøring. Opprettholder tilstrekkelig fuktighet for å unngå at blod og andre organiske materialer tørker.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Klar til bruk.

- Spray først aniosyme-skum på bunnen av bløtleggingskaret, og plasser deretter instrumenter som er samlet inn.
- Dekk alle instrumentene med skum.
- Dekk karet med lokk.
- Skyll behandlet medisinsk utstyr grundig med rent vann for å fjerne alle spor av produktrester og organisk tilsussing.

Ikke egnet for instrumenter laget av sink eller jern.

INNEHOLDER

Ikke-ioniske tensider, enzymer (proteaser, lipaser og amylaser), kompleksdannende midler, hjelpestoffer.

LAGRING

Farlig - respekter forholdsreglene for bruk (utarbeidet i henhold til gjeldene europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter). Oppbevaring: mellom + 5 ° C og + 25 ° C.

SERTIFIKATER

På forespørsel kan vi skaffe sertifikater.

SIKKER BRUK AV MEDISINSK ENHET

Vennligst les etikett og brukerinformasjon før bruk.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

ECOLAB[®]

www.ecolab.no